

AGAPLESION gAG

1. Material


- **Sämtliche Materialien (Stoff, Garn, Gummiband) müssen die Eigenschaft „kochfest“ besitzen.**

Der Stoff muss in zwei Lagen atmungsdurchlässig sein. Die Qualität sollte in etwa der Qualität der Dienstkleidung (65 % Polyester/35 % Baumwolle; Stoffgewicht ca. 215g/m²) entsprechen.

- Es wird benötigt:

- Ein Stück Stoff
 Breite 20 cm (1 cm Nahtzugabe + 18cm + 1cm Nahtzugabe)
 Höhe 32 (1 cm Nahtzugabe + 30cm + 1cm Nahtzugabe)

- 2 Gummibänder
 Breite ca. 0,7 cm
 Länge je 19cm

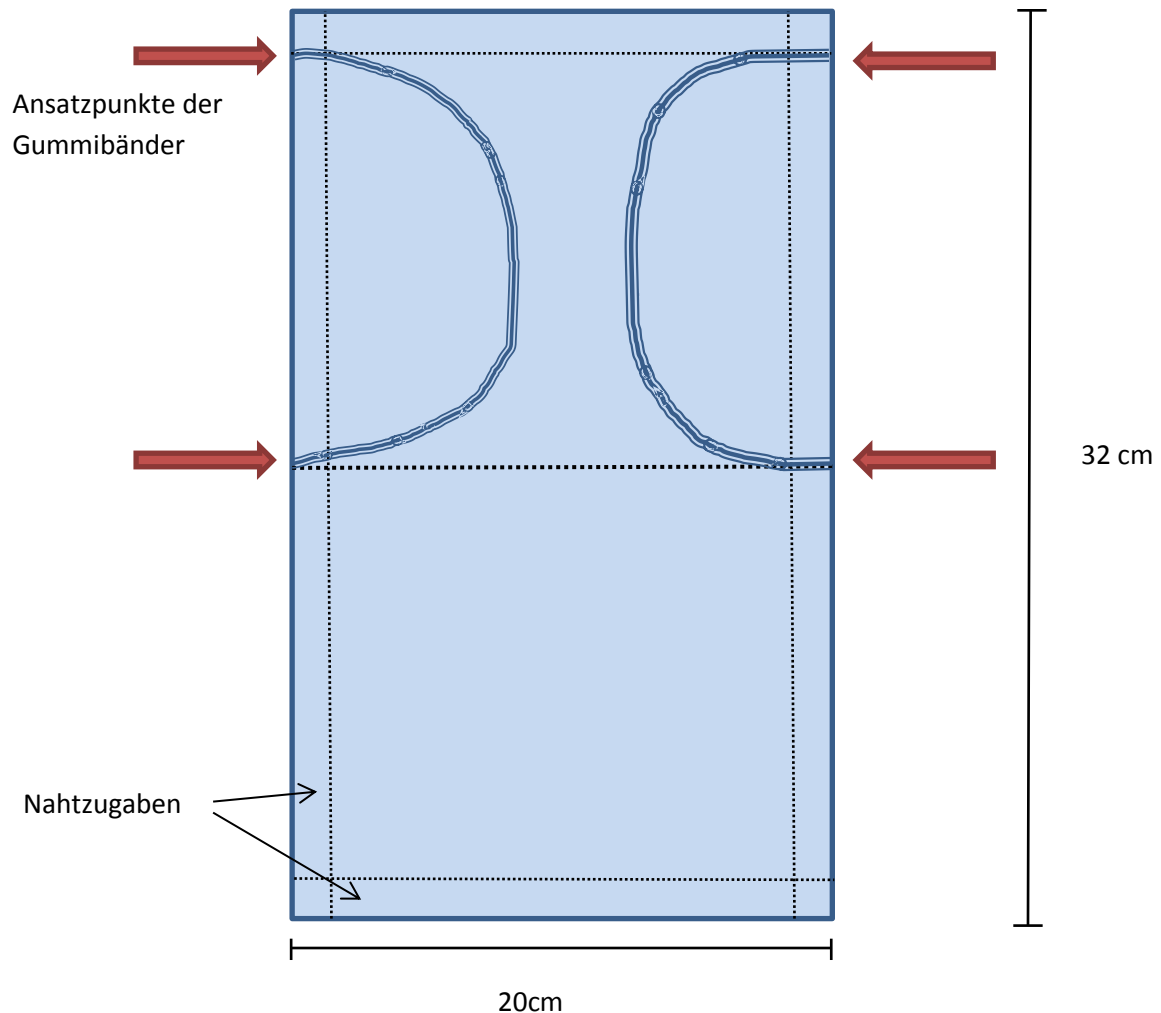



2. Fertigung



- Das Stofftuch einmal zur Hälfte (entlang der gepunkteten Linie in der Mitte der Zeichnung / des Bildes) falten und dann bügeln (insbesondere die Knickkante). Dies erleichtert die nachfolgende Positionierung des Gummibandes
- Ein Ende des ersten Gummibandes links oben unterhalb der Nahtzugabe (gepunktete Linie oben) mit ein paar Stichen fixieren, das andere Ende am mittigen Knick (entspricht gestrichelter Linie) auf der linken Seite genauso fixieren.
- Mit dem zweiten Gummiband auf der rechten Seite genauso verfahren.
- Es ist darauf zu achten, dass die Gummibänder so befestigt werden, dass die Schnittkanten der Bänder nach außen zeigen und die Schlaufen nach innen.



- Die untere Hälfte des Stofftuches nach oben schlagen und die offenen Seiten mit einer Steppnaht verschließen
- ACHTUNG! Dabei ist darauf zu achten, dass die Naht an einer Seite mittig nicht vollständig geschlossen wird. Es muss eine Lücke von ca. 3 cm verbleiben
- Mit den Nähten werden auch die Gummibänder befestigt



	<ul style="list-style-type: none">• Mit einem Finger durch die verbliebene Öffnung in das Innere des zusammengefügten Stoffstückes greifen und die beiden Gummibänder „angeln“• Die Gummibänder durch die Öffnung ziehen, dabei wird die Innenseite des Stoffes mit nach außen gewendet
	<ul style="list-style-type: none">• Das gewendete Stoffstück bügeln
	<ul style="list-style-type: none">• Ab ca. 4 cm Abstand von der oberen Kante drei Falten in den Stoff legen; Faltentiefe ca. 0,7 bis 1 cm• Zur leichteren Handhabung beim anschließenden Vernähen können die Falten mit Nadeln festgesteckt werden• Die Seiten mit den Falten von oben bis unten mit einer Steppnaht versehen. Dabei wird auch die noch vorhandene Öffnung auf einer der Seiten verschlossen.• Über den einzelnen Falten verstärkt nähen (vorwärts – rückwärts – vorwärts)
	<ul style="list-style-type: none">• Der fertige Mund-Nasen-Schutz sollte eine Breite von ca. 17 cm und eine Höhe (gefaltete Seite) von ca. 10 cm haben.